

**Bacillus atrophaeus** 菌種用培地

(EO ガス・乾熱・二酸化塩素・ホルマリン燻蒸 BI 用)

**保管上のご注意**

- ・ 2~10℃で遮光保管してください。

## 《使用説明書》

**使用前のご注意**

- ・ 使用前に有効期限をご確認ください。
- ・ 使用前に本品の完全性をご確認ください。
- ・ 冷蔵庫から取り出し、室温になってから使用してください。

**培地成分**

培地: ソイビーン・カゼイン・ダイジェストブロス

指示薬: フェノールレッド

**廃棄際のご注意**

- ・ 滅菌不十分と判定された時、培地は必ず滅菌処理 (121℃、30 分) を行った後廃棄してください。

## 使用方法

- 1 EO ガス、乾熱、二酸化塩素、ホルマリン燻蒸の滅菌終了後、芽胞ストリップが入ったアンプルまたは紙袋をクリーンベンチに持っていきます。
- 2 無菌状態でアンプルまたは紙袋からストリップを培地に移り入れます。
- 3 蓋を締め、専用の「ACE mini インキュベーター(品番:H8200)」にて **30~37℃** で二日間または七日間を培養します。
- 4 陽性コントロール: 滅菌処理をしていないアンプルまたは紙袋からストリップを培地に移り入れ、同様にインキュベーターにて培養します。陽性コントロールは、使用毎に用いてください。

## 結果判定

**陰性**

⇒ 培地の色は赤色から変化なし ⇒ 滅菌完全

**陽性**

⇒ 陽性コントロールのように、培地の色変化あり(赤色から黄色)

⇒ 滅菌不完全



製造者

上海福沢医薬器材有限公司

<http://www.fzme.com>

発売者

福沢商事株式会社

〒233-0013 横浜市港南区丸山台 2-36-30

TEL:045-845-2699 FAX:045-845-2889