

バイオロジカルインジケーター (蒸気化過酸化水素空間滅菌用)

《使用説明書》

菌種

Geobacillus stearothermophilus NBRC12550 (ATCC 12980)

培地成分

培地: ソイビーン・カゼイン・ダイジェストブロス

指示薬: ブロム・クレゾール・パープル

保管上のご注意

- ・ 2~25℃、20%~80%RH で遮光保管してください。
(培地は 2~10℃で保管してください。)
- ・ 滅菌器や殺菌消毒剤から離れた場所に保管してください。

使用前のご注意

- ・ 使用前に有効期限を確認してください。
- ・ 使用前に本品の完全性を確認してください。
- ・ 冷蔵保存の場合、室温になってから使用してください。

廃棄際のご注意

- ・ 滅菌不十分と判定された使用済み及び期限切れの本品は、必ず滅菌処理(121℃、30分)を行った後廃棄してください。

使用方法

- 1 所定の箇所に芽胞菌袋を置き、滅菌をかけます。
- 2 滅菌処理後、袋をクリーンベンチに持って行き、無菌状態で袋から芽胞キャリアを取り出し、培地の中に入れます。
- 3 蓋を締め、専用の「ACE mini インキュベーター(品番:H8200)」にて **55~60℃** で 24 時間、48 時間或は 7 日間を培養します。
- 4 陽性コントロール: 滅菌処理をしていない芽胞菌袋から芽胞キャリアを取り出し、培地の中に入れ、同様にインキュベーターにて培養します。陽性コントロールは、使用毎に用いてください。

結果判定

陰性

⇒ 培地の色は紫色から変化なし ⇒ 滅菌完全

陽性

⇒ 陽性コントロールのように、培地の色変化あり(紫色から黄色)
⇒ 滅菌不完全



製造者

上海福沢医薬器材有限公司

<http://www.fzme.com>

発売者

福沢商事株式会社

〒233-0013 横浜市港南区丸山台 2-36-30

TEL:045-845-2699 FAX:045-845-2889